

CONSERVATIVA

ipoclor⁵

La soluzione eccellente per i lavaggi canalari

Una scelta basata sull'evidenza scientifica
IPOCLOR 5 Sodio ipoclorito al 5% in cloro attivo. Soluzione pronta all'uso a base di ipoclorito di sodio al 5% per l'irrigazione dei canali radicolari nel corso di operazioni di alesaggio. La alta qualità del confezionamento primario in vetro, garantisce una stabilità maggiore del prodotto nel tempo.

Caratteristiche

- Elevata capacità di dissoluzione della componente organica grazie all'alta concentrazione (5,25) ed elevato pH
- Elevate attività antimicrobiche anche per Enterococcus Faecalis
- Dispositivo medico di classe II ad uso esclusivo del medico odontoiatra
- CE 0426

Avvertenze

Non miscelare il prodotto con sostanze acide poiché libererebbe gas tossici. Irritante per gli occhi e la pelle.
Non ingerire.
Non iniettare.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Confezione

Flacone multi dose in vetro I° da 250 ml

Composizione

Sodio Ipoclorito titolato al 5% in cloro attivo

Modalità d'uso

Con una siringa monouso dotata di ago per lavaggio canalare a punta smussa, aspirare dal flacone la soluzione ed effettuare il lavaggio canalare.

Medical device IIA  0426

