

## CONSERVATIVA

# ipoclor<sup>5</sup>

### La soluzione eccellente per i lavaggi canalari

Una scelta basata sull'evidenza scientifica  
IPOCLOR 5 Sodio ipoclorito al 5% in cloro attivo. Soluzione pronta all'uso a base di ipoclorito di sodio al 5% per l'irrigazione dei canali radicolari nel corso di operazioni di alesaggio. La alta qualità del confezionamento primario in vetro, garantisce una stabilità maggiore del prodotto nel tempo.

### Caratteristiche

- Elevata capacità di dissoluzione della componente organica grazie all'alta concentrazione (5,25) ed elevato pH
- Dispositivo medico di classe I ad uso esclusivo del medico odontoiatra
- CE

### Avvertenze

Non miscelare il prodotto con sostanze acide poiché libererebbe gas tossici. Irritante per gli occhi e la pelle.  
Non ingerire.  
Non iniettare.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### Confezione

Flacone multi dose in vetro I° da 250 ml

### Composizione

Sodio Ipoclorito titolato al 5% in cloro attivo

### Modalità d'uso

Con una siringa monouso dotata di ago per lavaggio canalare a punta smussa, aspirare dal flacone la soluzione ed effettuare il lavaggio canalare.

CE

